

Physiologica® neusreiniger



Verpakking

Beschikbaar in:

Physiologica® neusreiniger met 3 gratis opzetstukjes

Physiologica® wegwerp opzetstukjes voor neusreiniger met 10 opzetstukjes

Indicatie

De neusreiniger van Physiologica® kan vanaf de geboorte worden gebruikt bij een verstopte neus.

Eigenschappen

Hij verwijdert neusslijm zacht en doeltreffend. Zonder bisfenol A.

- Hygiënisch: het opzetstuk is uitgerust met een schuimfilter die het slijm vasthoudt.
- Geen onderhoud: na gebruik kan het opzetstuk weggegooid worden.
- Praktisch: de neusreiniger wordt geleverd met een handig opbergdoosje.

Gebruik

1. Een nieuw opzetstuk op het toestel plaatsen
2. De baby op zijn rug leggen.
3. De neus van de baby reinigen met een fysiologische oplossing om de opzuiging van slijm te vergemakkelijken.
4. Het opzetstuk tegen het neusgat houden en voorzichtig zuigen.
5. De handeling herhalen in het andere neusgat.
6. Het opzetstuk weggooien na gebruik.

Wegwerp opzetstukken zijn verkrijgbaar in hetzelfde gamma.

Website

www.physiologica.be