

Physiologica® septinasal spray



Présentation

Spray 50 ml

Indication

Humidification et nettoyage du nez par exemple en cas de nez bouché ou de rhume

Composition

NaCl (0,9%), Glycérol, Sorbate de potassium, Benzoate de sodium, Acide citrique monohydraté, Eau purifiée, Arôme: Thymol. Sans gaz propulseur.

Caractéristiques

Physiologica® septinasal spray est une solution saline en flacon pulvérisateur sans gaz propulseur utilisée en cas de rhume ou de nez bouché.

Une humidification ou un nettoyage avec Physiologica® septinasal spray permet ainsi :

- la diminution de l'obstruction nasale
- l'évacuation des mucosités et des agents infectieux
- l'amélioration des symptômes en cas de rhumes

Il permet ainsi d'aider à retrouver une meilleure respiration.

Utilisation

Dès la naissance. Aussi pour les femmes enceintes.

1 à 2 pulvérisations dans chaque narine, max. 4 fois par jour.

1. Retirer le capuchon protecteur de l'embout du spray.
2. Introduire délicatement l'embout dans la narine, pencher la tête légèrement en avant.
3. Appuyer brièvement (1 à 2 pulvérisations).
4. Renouveler l'opération dans l'autre narine.
5. Essuyer le nez avec un mouchoir, si nécessaire.

Site web

www.physiologica.be