

Physiologica® septinasal spray



Verpakking

Spray 50 ml

Indicatie

Bevochtigen en reinigen van de neus bijvoorbeeld in geval van een verstopte neus of verkoudheid

Samenstelling

NaCl (0,9%), Glycerol, Kaliumsorbaat, Natriumbenzoaat, Citroenzuur monohydraat, Gezuiverd water, Aroma: Thymol. Zonder drijfgas

Eigenschappen

Physiologica® septinasal spray is een zoutoplossing in een spray zonder drijfgas gebruikt in geval van verkoudheid of een verstopte neus.

Een bevochtiging of reiniging met Physiologica® septinasal spray:

- vermindert de verstopping van de neus
- verwijdert slijmen en besmettelijke stoffen
- verbetert de symptomen bij verkoudheid

Het maakt op die manier een betere ademhaling mogelijk.

Gebruik

Vanaf de geboorte. Ook bij zwangerschap.

1 à 2 verstuivingen in elk neusgat, max. 4 keer per dag.

1. Verwijder de beschermdop van de spray.
2. Breng het uiteinde van de spray voorzichtig in het neusgat terwijl het hoofd lichtjes naar voren wordt gehouden.
3. Druk kort (1 à 2 verstuivingen).
4. Herhaal deze handelingen in het andere neusgat.
5. Reinig indien nodig de neus met een zakdoek.

Website

www.physiologica.be